



ACCESSORIES

by Breas

Reinigungsanleitung für die Klick-in **Warmluftbefeuchter** der Serien Vivo 1-2-3 und Vivo 45 | 45 LS

Der Warmluftbefeuchter vermindert die Austrocknung der Nase während der nicht-invasiven Beatmung.

- Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über das Beatmungsgerät.
- Aufgrund der transparenten Wasserkammer ist der Füllstand jederzeit sichtbar.
- Die Wasserkammer ist leicht zu Befüllen und zu Reinigen.
- Der Warmluftbefeuchter fügt sich harmonisch in das kompakte Gehäusedesign ein, ohne die Standfläche des Gerätes zu vergrößern.
- Bei täglicher Nutzung und Reinigung beträgt der zu erwartende Verwendungszeitraum der Wasserkammer 12 Monate.



EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL

Gigasept® FF 5%-Lösung

Steranios 2%-Lösung

Zitronensäure (zum Entfernen von Ablagerungen)

DAUER

15 Minuten

10 Minuten

30 Minuten

ZYKLEN

20

20

WARNHINWEIS - VERBRENNUNGSGEFAHR

Der Warmluftbefeuchter kann im laufenden Betrieb sehr heiß werden. Berühren Sie daher **nicht** die Heizvorrichtung im Befeuchter, wenn Sie ihn direkt nach einer Behandlung von dem Beatmungsgerät entfernen und öffnen.

Warmluftbefeuchter Vivo 1-2-3, Artikel 006977


REINIGEN – DESINFIZIEREN

- Ziehen Sie den Deckel vom Warmluftbefeuchter ab. Entfernen Sie **nicht** die Silikon-Einsätze. Entfernen Sie **nicht** die Heizkartusche.
- Reinigen Sie den Warmluftbefeuchter von Hand oder in einem Geschirrspüler bei max. 70°C (ohne Reinigungsmittel). Die Befeuchterkammer darf **nicht in Autoklaven** desinfiziert werden.
- Achten Sie nach dem Reinigen darauf, dass die Silikondichtung korrekt sitzt. Beim Schließen des Befeuchters muss die Dichtlippe nach unten zeigen.

Die Wasserkammer kann bei 100° Celsius 5 Minuten ausgekocht werden.

Eventuelle Ablagerungen im Wasserbehälter können Sie wie folgt entfernen:

- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum Höchstfüllstand mit warmem Wasser und 15 g Zitronensäure.
- Lassen Sie diese Lösung 30 Minuten im Wasserbehälter einwirken, um die Ablagerungen aufzulösen.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und reinigen Sie ihn wie gewöhnlich.

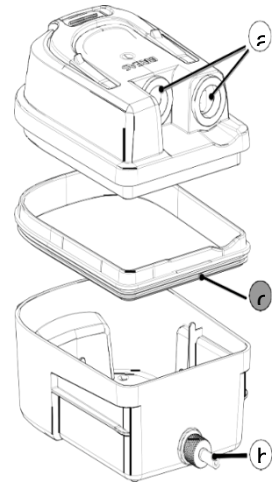

Warmluftbefeuchter Vivo 45 | 45 LS, Artikel 006490

REINIGEN – DESINFIZIEREN

- Ziehen Sie den Deckel vom Warmluftbefeuchter ab. Entfernen Sie **nicht** die Silikon-Einsätze.
- Reinigen Sie den Warmluftbefeuchter von Hand oder in einem Geschirrspüler bei max. 70°C (ohne Reinigungsmittel). Die Befeuchterkammer darf **nicht in Autoklaven** desinfiziert werden.
- Achten Sie nach dem Reinigen darauf, dass die Silikondichtung korrekt sitzt. Beim Schließen des Befeuchters muss die Dichtlippe nach unten zeigen.

Die Wasserkammer kann bei 100° Celsius 5 Minuten ausgekocht werden.

Eventuelle Ablagerungen im Wasserbehälter können Sie wie folgt entfernen:

- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum Höchstfüllstand mit warmem Wasser und 15 g Zitronensäure.
- Lassen Sie diese Lösung 30 Minuten im Wasserbehälter einwirken, um die Ablagerungen aufzulösen.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und reinigen Sie ihn wie gewöhnlich.

